



Lentila AIR OPTIX™ AQUA
combinație avansată de oxigen și hidratare
pentru confort la aplicare, o zi întregă, zi de zi

Caracteristici tehnice

Material	Lotrafilcon B
Transmisibilitate la oxigen (Dk/t)	138@ - 3,00 dpt
Conținut de apă	33%
Tentă de vizibilitate	albastru deschis
Grosime la centru	0,08mm - 3,00 dpt
Diametru	14,2 mm
Rază de curbură	8,6 mm
Dioptrii	de la -0,25 dpt la -8,00 dpt; pas de 0,25 dpt de la -8,50 dpt la -10,00 dpt; pas de 0,50 dpt de la +0,25 dpt la +6,00 dpt; pas de 0,25 dpt
Modalitate de purtare	zilnică sau până la 6 nopți de port continuu
Mod de înlocuire	lunar
Ambalare	3 lentile
Soluții de întreținere recomandate	AOSept Plus® SOLO-care Aqua™



Ghid de adaptare

Seleția pacienților	Recomandată pacienților purtători de lentile de contact care reclamă disconfort la aplicare sau la sfârșitul zilei și care sunt preocupați de sănătatea ochilor lor.
Alegerea lentilei	Adaptarea nu este necesară în cazul pacienților purtători de lentile AIR OPTIX™. Adaptați cu raza de curbură 8,6 keratometrii de la 7,20 la 8,30 mm.
Evaluarea adaptării	Adaptare optimă mobilitate de 0,5 mm, centrare bună, acoperire completă a corneei, vedere stabilă, percepere puțin lentila.
Vizite recomandate	În cazul portului continuu: <ul style="list-style-type: none"> • pacientul va dormi o noapte cu lentila și va reveni la control imediat după trezire • pacientul va reveni la control după 6 nopți de port continuu

Ceea ce nu vă spun pacienții poate limita succesul prescrierii lentilelor de contact.



- 74%** dintre cei care renunță la lentile simt disconfort - cazul cel mai des semnalat
- 47%** dintre purtători se plâng de disconfort la aplicare
- 72%** dintre purtători semnalează disconfort la sfârșitul zilei
- 26%** dintre purtători schimbă marca lentilelor cu una mai sănătoasă

O lentilă excepțională merită o soluție excepțională - AOSEPT® Plus

Dezinfectarea și curățarea puternică fac din AOSEPT® Plus alegerea ideală pentru lentilele din silicon hidrogel.

- #1 în curățare
- #1 în confort
- #1 în claritatea vederii
- dezinfectare fără conservanți
- absența efectivă a colorării corneei cu fluoresceină

Recomandați AOSEPT® Plus pentru o lentilă proaspătă și curată în fiecare zi.

