

AIR OPTIX™ – lentile care respiră pentru sănătatea
ochilor pacienților dumneavoastră



până la de 6 ori mai mult oxigen*

Caracteristici tehnice

Material	Lotrafilcon A
Conținut de apă	24%
Grosime la centru	0,08 mm
Raze de curbură	8,4 °i 8,6 mm
Diametru	13,8 mm
Dioptrii	de la + 6,00 la - 8,00 dpt; pas de 0,25 de la -8,50 la -10,00 dpt; pas de 0,50
Modalitate de purtare	flexibilă sau continuă până la 30 de nopți °i zile
Mod de înlocuire	lunar
Ambalare	3 lentile
Solubii de întreținere recomandate pentru port flexibil	AOSept plus ® SOLO-care AQUA ™

* față de lentilele din hidrogel cu Dk/t mediu: 26



Pentru sănătatea ochilor dumneavoastră

Ghid de adaptare

Selecția pacienților	Recomandată celor care: aleg ce e mai bun pentru ochii lor doresc lentile cu cel mai înalt grad de transmisibilitate a oxigenului prezintă semne și simptome, examinați la biomicroscop au senzația de ochi uscați cu lentilele de contact obișnuite* poartă lentile de contact multe ore pe zi sau dorm – – de obicei – cu ele nu vor să se complice cu întreținerea și manevrarea lor zilnică
Alegerea lentilei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raza de curbură recomandată este 8,4 mm. 2. Stabilirea dioptriei lentilei se face ținând cont de distanța vertex.
Evaluarea adaptării	Adaptare optimă: mobilitate de 0,2 ÷ 0,5 mm, centrare bună, acoperire completă a corneei, vedere stabilă, percepe puțin lentila
Vizite recomandate	în cazul portului continuu: pacientul va dormi o noapte cu lentila și va reveni la control imediat după trezire pacientul va reveni la control după 6 nopți de port continuu

Purtătorii de lentile și prescriptorii au fost mai mulțumiți – decât cu lentilele de contact obișnuite* – din punct de vedere al:
 confortului la sfârșitul zilei
 ușurinței în manevrare
 aspectului mai sănătos al ochilor



* fapă de lentilele din hidrogel cu Dk/t mediu: 26

Sunați acum la OPTIMED și comandați lentilele de probă, la telefon 0268/471603 sau 0268/473234.

CIBA  **VISION**

Pentru alte informații referitoare la prescripțiile de lentile AIR OPTIX:

 **optimed**

Vizitați site-ul www.airoptix.com
 sau contactați-ne la adresa de e-mail office@optimed.ro