

AOSEPT PLUS

PREZENTUL PROSPECT CONTINE INDICATII IMPORTANTE PENTRU UTILIZAREA PRODUSULUI. VA RUGAM CITITI CU ATENTIE SI RETINETI! INTRETINEREA INCORECTA A LENTILELOR DE CONTACT POATE PROVOCA AFECTIUNI GRAVE ALE OCHILOR.

Sistemul de intretinere AOSEPT PLUS

Pentru curatarea, dezinfectarea, neutralizarea, indepartarea proteinelor si pastrarea tuturor tipurilor de lentile de contact, inclusiv cele din silicon-hidrogel.

DESCRIERE

Sistemul AOSEPT PLUS contine:

A. Solutia de curatare si dezinfectare AOSEPT PLUS

B. Recipientul AOSEPT PLUS cu catalizatorul neutralizant AODISC. Inainte de folosire asigurati-va ca AODISC-ul este atasat.

Solutia **AOSEPT PLUS** si recipientul **AOSEPT PLUS** cu AODISC **trebuie intotdeauna utilizate impreuna.** Solutia apoasa **AOSEPT PLUS** fara conservanti contine: hydrogen peroxide 3% phosphonic acid (stabilizator), sodium chloride, phosphate (sistem tampon), poloxamer (surfactant).

STERILE

A

Fabricat in conditii aseptice

MOD DE ACTIUNE

Sistemul **AOSEPT PLUS** este un sistem de intretinere usor de utilizat pentru toate tipurile de lentile de contact, inclusive cele de silicon-hidrogel. Hydrogen peroxide si poloxamer ca agent activ de suprafata dezinfecteaza si curata lentilele. AODISC-ul descompune hydrogen peroxide in apa si oxygen, rezultand o solutie salina. Dupa incheierea procesului de neutralizare, lentilele de contact pot fi aplicate direct pe ochi. La recomandarea specialistului dvs. in lentile de contact, sistemul AOSEPT PLUS poate fi utilizat cu o solutie salina sterila si o solutie de indepartare a proteinelor.

NU INCERCATI NICIODATA SA CURATATI SAU SA CLATITI LENTILELE IN MANA CU SOLUTIA AOSEPT PLUS.

NU CURATATI LENTILELE DVS. DE CONTACT IN COMBINATIE CU ALTA SOLUTIE DE INTRETINERE DEOARECE ORICE REZIDUU DE SOLUTIE POATE PROVOCA O REACTIE DE EFERVESCENTA, IAR SOLUTIA SE VA REVARSA DIN RECIPIENT.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Spalati mainile si stergeti-le cu un prosop curat

1. deschideti recipientul marcat cu "L", plasati lentila stanga pe suprafata special amenajata. Inchideti recipientul avand grija sa nu prindeti lentila. Repetati procedura cu lentila dreapta., plasand-o pe suprafata special amenajata marcata cu "R".
2. **clatiti bine lentilele din recipient cu AOSEPT PLUS timp de 5 secunde**
3. umpleti recipientul cu solutie AOSEPT PLUS exact pana la semn, **NU UMPLETI SUB SAU PESTE SEMN.**
 - a. Introduceti suportul de lentile in recipient si insurubati capacul
 - b. Nu este nevoie sa agitati recipientul .

4. pastrati recipientul in pozitie verticala. Daca bulele de oxigen continua sa iasa prin orificiul din capac, este posibil sa fi ramas solutie **AOSEPT PLUS** neneutralizata. Goliti recipientul si indepartati orice urma de solutie **AOSEPT PLUS** de pe suprafata recipientului. Clatiti bine recipientul si suportul de lentile **AOSEPT PLUS** cu solutie salina sterila si spalati mainile constiincios sub jet de apa. Repetati procedura de dezinfectare mai sus mentionata.
RETINETI! NU UMPLETI RECIPIENTUL PESTE SAU SUB SEMN.
5. Lasati lentilele de contact in solutie minim 6 ore sau peste noapte pentru a se neutraliza solutia.
 - a. Scoateti lentilele de contact din suport.
 - b. Lentilele dvs. sunt acum gata pentru a fi purtate
6. Aruncati solutia folosita.

Daca nu intentionati sa purtati lentilele imediat dupa dezinfectare/neutralizare, puteti sa le pastrati pana la 14 zile in solutie neutralizata AOSEPT PLUS, din recipientul AOSEPT PLUS nedeschis. Inainte de purtare, dezinfectati si neutralizati lentilele la fiecare 14 zile cu solutie proaspata.

Este important sa sa pastrati recipientul si suportul de lentile AOSEPT PLUS curate si necontaminate:

7. Clatiti zilnic recipientul si suportul de lentile **AOSEPT PLUS** cu solutie salina- **NU FOLOSITI APA DE LA ROBINET SAU APA NESTERILA**
8. Lasati recipientul sa se usuce in aer- scoateti suportul de lentile din recipient si asezati-l cu capacul in jos.

CONTRAINDICATII

- Nu folositi **AOSEPT PLUS** in cazul in care sunteti sensibil la oricare dintre ingredientele acesteia.
- Nu folositi **AOSEPT PLUS** pentru dezinfectie termica.

PRECAUTII

- Nu folositi solutia dupa data expirarii
- Verificati daca flaconul este sigilat inainte de prima folosire. Daca nu este sigilat, nu folositi.
- Inchideti capacul dupa folosire.
- Odata deschis un flacon, nu folositi mai mult de 3 luni.
- Nu atingeti picuratorul flaconului de nicio suprafata, deoarece aceasta poate infecta solutia.
- Folositi intotdeauna recipientul nou oferit cu fiecare solutie **AOSEPT PLUS**.
- A se pastra sub 25°C
- Intodeauna folositi **AOSEPT PLUS** la temperaturi intre 15°C si 25°C deoarece neutralizarea sub 15°C poate sa dureze mai mult de 6 ore.
- Feriti de razele directe ale soarelui.
- Consultati-va specialistul in lentile de contact inainte de a schimba tipul solutiei de intretinere a lentilelor de contact.

RETINETI

- **Nu aduceti in contact cu ochiul solutie neneutralizata**
- **FOLOSITI NUMAI RECIPIENTUL PENTRU LENTILE INCLUS. NU FOLOSITI NICI UN ALT RECIPIENT.**
- **Inainte de aplicare, asigurati-va intotdeauna ca lentilele sunt corect neutralizate. SOLUTIA AOSEPT PLUS NENEUTRALIZATA ESTE UN DEZINFECTANT FOARTE EFICIENT, CARE VA PROVOCA O SENZATIE DE ARSURA la contactul cu ochiul. Daca, in mod accidental, aplicati o lentila neneutralizata, indepartati imediat lentila si clatiti ochiul din abundenta cu apa sterila sau solutie salina. Dezinfectati din nou lentilele inainte de aplicare.**
- Folositi intotdeauna solutie **AOSEPT PLUS** proaspata- nu re folositi niciodata solutia din recipient.

- **NICIODATA NU** diluati sau amestecati **AOSEPT PLUS** cu alte solutii, deoarece acest lucru ii va distruge eficacitatea.
- **NICIODATA NU** aduceti lentilele in contact direct cu apa nesterila (inclusiv apa de la robinet) deoarece pot fi contaminate microbial, ceea ce ar putea duce la vatamarea permanenta a ochiului.
- **NU LASATI LA INDEMANA COPIILOR**
- **Daca inghititi solutie neneutralizata beti imediat o cantitate mare de apa si prezentati-va la medic.**
- Consultati-va medicul sau specialistul in lentile de contact inainte de folosirea oricarui medicament pe durata purtarii lentilelor de contact.

REACTII ADVERSE

Daca aveti o senzatie permanenta de disconfort sau iritare scoateti lentilele, intrerupeti folosirea produsului si consultati specialistul Dvs. in lentile de contact.

PREZENTARE

60ml, 360ml. Fiecare pachet contine un recipient cu AODISC.

MF= Fabricat pentru:

**CIBA Vision Corporation Duluth,
Georgia 30097, USA**

M= Fabricat de:

CIBA Vision Canada Inc., Canada

EU= Reprezentant in UE:

CIBA Vision GmbH

63868 Grosswallstadt, Germany

Distribuitor in Romania:

OPTIMED SRL

Str. Lunga Nr. 9

500035 Brasov

E-mail: office@optimed.ro

